

FemiLift

Hatékony megoldás Női Problémákra

- Biztonságos
- Egyszerű & Hatékony
- Rövid kezelési idő
- Minimálisan Invazív
- Bővíti szolgáltatásai körét



Alma™



Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnovatívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.

Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika területét. Forradalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.

Nőként komfortosan

A női élet bizonyos változásai mint a szülés, menopauza, súlyingadozás, hormonális változások, negatívan befolyásolhatják a női életminőséget, magabiztosságot és a sexualitást.

A lézer használata a nemiszervek gyógyításában sokat fejlődött a nemi szemölcsök (condyloma) kezelése óta. Széleskörű segítséget nyújt a szülés, a menopauza vagy a rák legyőzése utáni regenerálódásban, az esztétikai helyreállításban ill. a szexuális funkció javításában.

A FemiLift lehetővé teszi az orvos számára, hogy különböző női indikációkat kezeljen gyorsan és hatékonyan. A kezelést járóbeteg ellátásban végzik, nem igényel helyi érzéstelenítést, így a páciens a kezelés után azonnal folytathatja napi rutinját.

FemiLift széleskörű nőgyógyászati felhasználásra

A FemiLifttel bővítheti szolgáltatásait és páciensei körét

SZEMÉREMAJKAK

- Labia Plasztika
- Fehérités
- Condyloma
- Labia feszesítés
- Hegkezelés
- Lichen Sclerosus
- Vulvodynia

Focus



LiteScan



FemiTight



HÜVELY

- SUI
- VVA
- Hüvelyszárazság
- VIN
- Condyloma

FemiLift



FemiLift Smart



FemiLift Slim



TruSpot



MÉHNYAK

- CIN
- Condyloma
- Cervical Erosion

TruSpot



FemiLift az Alma-tól

Korszerű Technológia

A CO₂ lézereket az 1960-as évek óta használják világszerte a nőgyógyászat, fül-orr-gégészet és a bőrgyógyászat területén.

A FemiLift a CO₂ lézeres technológia teljesítményét, precizitását és sokoldalúságát használja, és így ajánl négyféle energia beviteli módot és kézidarabok széles skáláját, hogy a női nemi szervet a legátfogóbb módon kezelje.

Működési módok

01

Pixel CO₂ – Frakcionált

A lézersugarat 9x9 pontra bontja, melyek egyenként mikrosérüléseket hoznak létre. A szöveti regeneráció serkenti az új kollagén szintézist és a neovaszularizációt. A 81 apró lézersugár lehetővé teszi, hogy a területet hosszabb ideig kezelje, így érve el nagyobb termikus hatást.

02

Vág és koagulál – Fókuszált


A FemiLift kombinálja a vágásra és a koagulálásra alkalmas üzemmódokat, így ezeket egyszerre használhatja anélkül, hogy kézidarabot cserélne vagy üzemmódot váltana. Ez az üzemmód az olyan sebészeti alkalmazásokhoz ajánlott, mint a bemetszés, kimetszés, abláció és koaguláció.

03

Defókuszált - Nem ablatív

A FemiLift defókuszált nem ablatív üzemmódja a bőr fiatalítását szolgálja. Kíméletes termikus hatásának köszönhetően serkenti a kollagén termelődését.

A FemiTight kézidarab kifejezetten a kisajkak fiatalítására és feszesítésére lett kifejlesztve. A lézersugár defókuszálásával az energiát az ablatív határérték alatt tartja.

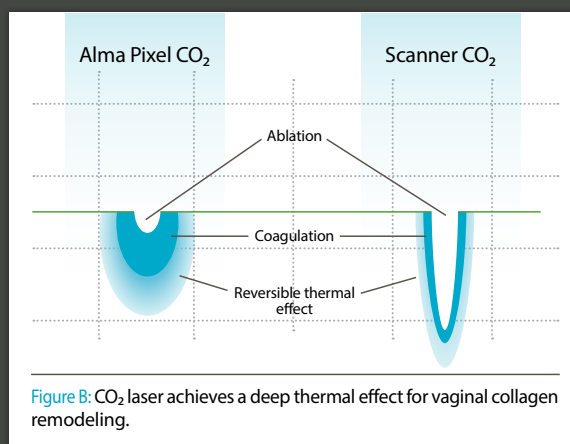

FemiLift, Smart & Slim kézidarabok

GSM | Stressz inkontinencia | Tág hüvely | Atrófia és fájdalom

FemiLift Smart - (28 mm-es átmérő)

A FemiLift Smart egy robotikus kézidarab, mely lehetővé teszi előre beállított paraméterek alapján a hüvely gyors és egyenletes kezelését.

FemiLift Slim - (18 mm-es átmérő)

A FemiLift Slim kézidarab a szűkebb hüvelyi struktúrákra lett tervezve, ill. olyan páciensek számára, akik korábban anatómiai vagy szövettani változásokat tapasztaltak, mint az atrófia vagy onkológia kezelése hatására.



FemiTight kézidarab

Defókuszált nem ablatív üzemmód nagyajak feszesítéshez.

A FemiTight kézidarab kíméletesen melegíti fel a szöveteket, segíti a kollagén szintézist és a szövetek zsugorítását. A FemiTight kezelése nem jár fájdalommal és nem igényelnek lábadozási időt.



Focus kézidarabok

Sebészeti beavatkozásokhoz, bemetszéshez, kimetszéshez, ablációhoz és koagulációhoz.

Condyloma | Labioplastika | CIN | VIN | VAIN

Focus 50 és 100 mm-es kézidarabok

Sebészeti beavatkozásokhoz.



LiteScan kézidarab

Frakcionált szkennel sebhelyek, hegek, condyloma eltávolítására és bőrfehéítésre.

Frakcionált szkennel, mely előre beállított mintázatok - négyzet, kör, frakcionált stb. - alapján kezel.





A FemiLift prakszisához adott értékei:

- Csatlakozzon a hüvelyi átalakítások jövedelmező piacához
- Sokoldalú készülék, gyors megtérülés
- Egészségügyi és esztétikai indikációkra
- Nem ablatív mód
- Egyedi Pixel technológia

„Egy felmérés szerint a készülék ára országtól függően 10-20 műtét árának felel meg.”

Jorge Alberto Elías, MD,

Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso Pelviano y la Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina

- Kezelések különböző nőgyógyászati indikációkra
- Rövid és biztonságos kezelések
- Fájdalommentes



Alma™

Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnovatívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.

Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika területét. Forradalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.

Alma Lasers Magyarország

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.(1)466 5665
info@almalaser.hu

www.almalasers.hu

© 2019 Alma. All rights reserved. Alma Lasers, its logo, and Femilift are trademarks and/or registered trademarks of Alma in the United States and/or other countries.

